

Mesh-Vernebler Inno-Spire Go

- > nahezu geräuschlos
- > Behandlung in 4 Minuten
- > langlebiger Akku
- > einfacher Aufbau – nur zwei Einzelteile



Beschreibung:

Der einfach zu bedienende und nahezu geräuschlose InnoSpire Go wurde speziell dafür entwickelt, die Behandlungsdauer zu verkürzen, sodass Sie wieder mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben.

Der InnoSpire Go ist mit der klinisch erprobten Vibrating-Mesh-Technologie ausgestattet. Diese erzeugt ein sehr feines Aerosol (Partikelgröße 3,9 µm), sodass eine optimale Wirkstoffmenge ihren Bestimmungsort in den unteren Atemwegen erreicht. Das Gerät ist für die Verneblung sämtlicher Substanzen aus der Gruppe der Beta-Agonisten, Anticholinergika, inhalierbaren Corticosteroide und Antibiotika nutzbar, die zur Behandlung obstruktiver Atemwegserkrankungen verschrieben werden. Die Behandlungszeit beträgt nur vier Minuten.

Mit einem Gewicht von gerade einmal 111 Gramm und nahezu geräuschlosem Betrieb ist der handliche InnoSpire Go der ideale Begleiter für unterwegs. Der integrierte wieder aufladbare Lithium-Ionen-Akku liefert Energie für bis zu 30 Inhalationen. Die Therapie ist auch während des Ladevorgangs möglich. Akustische und visuelle Signale zeigen den Abschluss der Behandlung an, bevor das Gerät sich selbst ausschaltet. Der anwenderfreundliche zweiteilige Aufbau erleichtert die Reinigung und Pflege. Für Kinder und Erwachsene, die nicht mit dem Mundstück inhalieren können, sind LiteTouch-Masken in drei Größen erhältlich.

Mesh - Vernebler InnoSpire Go– entdecken Sie neue Lebensqualität!

Der InnoSpire Go ist einfach zu bedienen und unterstützt Sie dabei die Behandlung richtig durchzuführen.

Gebrauchsanweisung:


1. Vorbereitung

Öffnen Sie einfach die grüne Abdeckung und geben Sie das Medikament hinein. Schließen Sie die Abdeckung wieder und setzen sich aufrecht hin, um die Behandlung zu beginnen.



2. Anwenden

Drücken Sie auf die Einschalttaste und atmen Sie durch das Mundstück ein und wieder aus. Der InnoSpire Go gibt hörbare und sichtbare Signale aus, wenn die Behandlung abgeschlossen ist – und schaltet sich anschließend selbst aus.

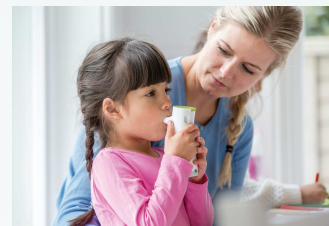

3. Reinigen

Nehmen Sie das Mundstück nach jeder Behandlung ab und spülen es mit warmen Wasser. Reinigen Sie es jeden Abend in warmen Seifenwasser und desinfizieren Sie es einmal wöchentlich in kochendem Wasser.



Die Effekte auf einen Blick:

Behandlung in 4 Minuten*

Der InnoSpire Go ermöglicht eine wirksame Therapie. Bei Abschluss der Behandlung gibt er hörbare und sichtbare Signale aus – und schaltet sich anschließend selbst aus.

Einfacher Aufbau – Nur zwei Einzelteile

Dank des aufsetzbaren Mundstücks lässt sich der InnoSpire Go einfach verwenden, reinigen und pflegen.

Integrierter, langlebiger Akku

Mit dem wiederaufladbaren Akku sind bis zu 30 Behandlungen möglich, bevor dieser wieder aufgeladen werden muss.

Nahezu geräuschlos

Ein kleiner, tragbarer und unauffälliger Vernebler, der überall verwendet werden kann.

*Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.

Hersteller: Respironics, USA

Vertrieb: HaB GmbH, Porschestra. 4, 21423 Winsen

Lungentrainer.de