

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Nutzung der Nasenflügelheber sorgfältig.

Material Lebensmittelicher Kunststoff

Modelle Set mit 3 verschiedenen Größen

Anwendung des Nasenflügelhebers

- sportliche Betätigung
- Schnarchen
- Schlafapnoe
- Atemnot
- Sauerstoffmangel
- Pflasterallergie

Gegenanzeigen Bei korrekter Anwendung können die Nasenflügelheber von fast jedem verwendet werden und haben keine negativen Nebenwirkungen.

Verträglichkeit des Nasenflügelhebers

Der HNO-Arzt stellt einem Probanden nach 3 Jahren regelmäßiger Benutzung des Nasenflügelhebers folgenden Befund: „... war bei der optischen Untersuchung ... keine Pathologie im Bereich der Kontaktstelle feststellbar. Die Schleimhaut war unauffällig, ohne Druckstelle und ohne Lokalreaktion.“

Hersteller: NFH Handels GmbH · Müsinenstraße 38 · 6832 Sulz (Österreich)
Vertrieb: HaB GmbH · Porschestra. 4 · D-21423 Winsen

Lungentrainer

Atmung ist Leben



Atme dich frei!

Nasenflügelheber

Gebrauchsanweisung


Lungentrainer.de

Artikel-Nr: 270.00000

PZN: 17 30 49 51

Anpassungshinweise

Der Nasenflügelheber kann in der Breite und Schrägstellung durch leichten Druck, wie unten abgebildet, individuell angepasst werden. Es wird somit ein stabiler angenehmer Tragekomfort ermöglicht.

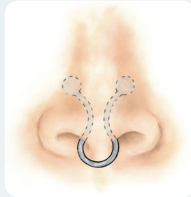

Verminderte Luft- bzw. Sauerstoffaufnahme durch die Nase hat verschiedene Ursachen. Bei einem engen Klappenbereich (hohe, schmale Nase, Spannungsnase) bilden die Nasenhöhlen eine ovale Form. Bei schmalen Nasenlöchern besteht die Gefahr, dass die Nasenflügel vom inspiratorischen Luftstrom angesaugt werden und dadurch kollidieren (Ansaugphänomen der Nasenflügel).

Ähnliche Beschwerden können auch bei Verformung der Nasenscheidewand, bei knöchernen Veränderungen der Nasenpyramide nach Traumen und bei Schwellungen der Nasenmuscheln auftreten.

Beim peripheren Schnarchen kann die Ursache eine Behinderung der Nasenatmung sein.

Der Nasenflügelheber kann in Breite und Schrägstellung der jeweiligen Nasenform angepasst werden.

Die Lebensdauer beträgt ca. 3 Jahre – der Spareffekt gegenüber einem Nasenpflaster ist damit beachtlich.

Wirkung des Nasenflügelhebers

Der Nasenflügelheber stabilisiert die Nasenflügel von innen und erweitert die Nasenklappe. Die Folge ist ein vermehrter Luftstrom durch die Nase. Engstellen im Klappenbereich, eine zu schmale Nase bzw. ein insuffizienter, weicher Knorpel führen zu einer eingeschränkten Nasenatmung.

Durch den Nasenflügelheber wird die Nasenatmung gefördert und die Austrocknung im Mund-Rachenbereich gemindert.

Die Atemintervalle verringern sich durch eine erweiterte Nasenatmung. Durch Schlafapnoe hervorgerufene Herz-Kreislaufprobleme werden gemindert.

Schnarchgeräusche entstehen durch die Vibration des weichen Gaumens bei pathologischer Mundatmung. Schnarchen kann durch den Nasenflügelheber verringert oder sogar völlig verhindert werden.

Der patentierte Nasenflügelheber gewährleistet eine ungestörte Nasenatmung. Der Anwender ist nicht mehr gezwungen durch den Mund zu atmen.

Haben Sie Fragen zur Anwendung oder Anregungen, stehen wir Ihnen gerne unter Telefon **04171 890 81 70 oder per E-Mail unter **service@lungentrainer.de** zur Verfügung. Sprechen Sie auch gerne Ihren Apotheker an.**