



Atemphysiotherapiegerät

VRP1 Flutter

Starter-Set mit Halteband

ACHTUNG:
Nicht hitze-
beständig!

- befreit von zähem und festsitzendem Bronchialschleim
- reduziert die Gefahr von Infektionen und Entzündungen durch Bronchialschleim
- verringert die Atemnot



Das Atemtherapiegerät zur effektiven Schleimelimination

Schwingungen lösen Schleim!

Die beim Ausatmen gegen die Kugel entstehenden Druckschwankungen versetzen die Atemluft in Schwingungen. Diese Vibration im Bronchialsystem (endobronchiale Perkussion) führt dazu, dass sich der zähe Schleim lockert, von der Bronchialwand löst und leichter abgehustet werden kann.

Der VRP1 Flutter zur physikalischen Therapie bei:

- Chronischer Bronchitis
- Lungenemphysem
- Bronchiektasie
- Mukoviszidose
- Patienten mit Sekretverhalt vor und nach Operationen

Anwendung, Sitzungslänge und Häufigkeit

Es werden zwei Sitzungen täglich (einmal morgens und einmal abends) empfohlen. Eine Sitzung dauert normalerweise 5 bis 15 Minuten, abhängig vom Zustand der Lunge.

Damit keine zu große Erschöpfung eintritt, können drei Sitzungen täglich anstatt zwei durchgeführt werden.

Die genaue Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



Diese Kurzbeschreibung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung des Herstellers.

Atemphysiotherapiegerät VRP1 Flutter – Starter-Set


Vibration, Druck und effektive Schleimelimination

Handhabung des VRP1 Flutter


Empfohlene Sitzpositionen

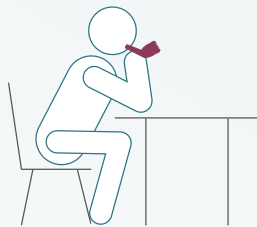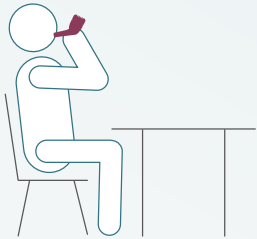


Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

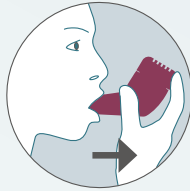

Mittelstellung – waagerechte Haltung

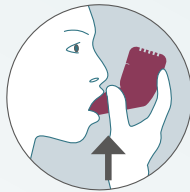

Neigung nach oben – Anwender muss mehr Kraft für die Ausatmung aufbringen

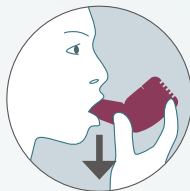


Neigung nach unten – Anwender muss weniger Kraft für die Ausatmung aufbringen

Hinweise

Der VRP1 darf nicht benutzt werden, wenn ein Pneumothorax (Luftansammlung zwischen Lungen- und Rippenfell) vorliegt! Bei der Verwendung des VRP1 Flutters kommt es zu keinen unerwünschten Wechselwirkungen mit der bestehenden medikamentösen Therapie. Der VRP1 Flutter ist verordnungsfähig. Die **PZN** lautet: **16196554**, die entsprechende **Hilfsmittelnummer** ist: **14.24.08.0002**.

Montageanleitung für das Halsband

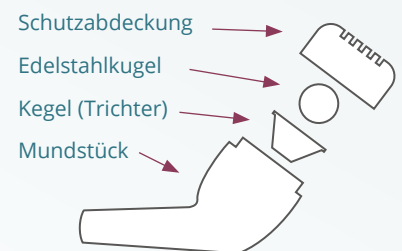

1. Schrauben Sie das Kopfteil Ihres VRP1 Flutters ab.
2. Entnehmen Sie die Kugel und den Trichter. Legen Sie das Halteband um das Hauptteil und ziehen Sie es straff an das untere Ende des Gewindeganges.
3. Legen Sie den Trichter und die Kugel wieder ein.
4. Schrauben Sie das Kopfteil wieder auf. Achten Sie darauf, dass das Halteband ganz unten sitzt und sich das Kopfteil komplett ohne Kraftaufwand aufschrauben lässt.

Reinigung

Der VRP1 Flutter ist leicht zu reinigen. Verwenden Sie für die Reinigung lauwarmes Wasser und ein handelsübliches Spülmittel. **Das Gerät ist nicht hitzebeständig und somit nicht auskochen - und autoklavierbar.**